

INDICACIONES PARA EL CLÍNICO

- Antes de tomar impresiones ver la necesidad o no, de realizar una limpieza para retirar el sarro.
- Toma de impresiones de alta calidad, verificando ausencia de arrastres, poros y que salgan en los registros hasta la última pieza erupcionada.
- Registro de mordida
- Una vez recibido el presupuesto en pdf, a través de e-mail, si el paciente acepta, rellenar el formulario de consentimiento firmado por el paciente.
- A partir de la aceptación del presupuesto, la clínica recibirá todos los alineadores con sus prototipos, numerados para una fácil localización.
- Se realizará, si es el caso, antes de colocarlos el stripping indicado en el presupuesto. Introduciendo seda dental sin cera entre cada diente , si ésta pasa sin dificultad no hay que hacer mas stripping, en cambio, si no pasa se debería aliviar un poco más la zona.
- Como hay que cambiar los alineadores cada dos semanas, nuestra recomendación es evaluar el tratamiento una vez al mes, entregando al paciente de dos en dos alineadores.
- Cuando se le entreguen los primeros alineadores se le darán también las instrucciones de uso, y una tabla que indicará las fechas en las que se deben cambiar.